

CE
0425

Cánulas de
Aspiración

D.M. clase IIa

Esterilizar antes del uso



Company

Via Natta, 6/A
43122 Parma
Tel. + 39 0521 607604
Fax + 39 0521 607628

<http://www.cattani.it>
Email: info@cattani.it



CATTANI

Advertencias: Usar autoclave tipo B.
N° máx. de esterilizaciones = 100
Las cánulas dañadas no pueden ser utilizadas.

INSTRUCCIONES

Las cánulas usadas, inmediatamente después de su uso, deben ser guardadas en contenedores o sumergirlas directa y completamente en la solución de descontaminación de Eco Jet 2, al 1,5% o al 3%, por el tiempo requerido según las instrucciones de uso del producto.

Limpieza: si es manual, usar un cepillo adecuado incluso para el interior. Se puede usar el baño de ultrasonidos o la termodesinfectadora.

Después del lavado, aclarar con agua durante un minuto, prestando atención a la parte interna.

Secado: con paño, papel o aire, también en el interior.

Embolsado: en las bolsas adecuadas para autoclave.

Esterilización: a 134°C y 2,1 bar durante 10 minutos.

Conservación: En armario preparado para el estocaje. El tiempo máximo de la duración de la esterilidad en condiciones de estocaje, viene indicado en la caja de las bolsas.



**Esterilizar las cánulas antes
de ser desechadas**



04
PE-LD
Packaging